

Varios Combi Pro2

Combo détartreur ultrasonique et aéropolisseur



NSK



32

raisons d'acheter le Varios Combi Pro2

Après avoir écouté les professionnels de la dentisterie pour bien comprendre leurs besoins, nous avons conçu un appareil combiné qui offre les fonctionnalités évoluées que les praticiens désirent réellement.

Alliant l'aéropolissage par poudre sous- et sus-gingival au détartrage ultrasonique pour les traitements parodontaux, le Varios°Combi°Pro2 a été pensé pour offrir un maximum de convivialité et épouser votre style de traitement préféré.

Né de l'expertise et des recherches approfondies de NSK, le Varios°Combi°Pro2 vous procure la fiabilité et les performances auxquelles vous avez appris à vous attendre de nos produits. Sa durabilité, son entretien simple et sa conception axée sur une utilisation quotidienne en font l'appareil idéal pour effectuer des interventions dentaires de routine en douceur, efficacement et sans interruption.

Avec NSK à vos côtés, vous disposez du matériel nécessaire pour donner le meilleur de vous-même et prodiguer des soins fluides et efficaces, de la prévention au traitement, et ce, à chaque patient et à chaque fois.

DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE

Bouteille d'eau facile à éjecter

Pour plus de commodité, le réservoir d'eau est facile à retirer et à réinstaller.

Pièce à main de détartrage en titane

L'appareil comprend la première pièce à main de détartrage ultrasonique au monde faite de **titane pur**. Notre finition **DURAGRIP** antidérapante exclusive vous procure une prise ferme et stable, tandis que la lampe à DEL vous assure une excellente visibilité.

Débit d'eau réglable

Notre cadran analogique vous permet de régler le débit d'eau de manière intuitive.

Chaque cadran est associé à l'une des fonctions, soit le détartrage ou l'aéropolissage.

Chauffage de l'eau

Pour assurer un confort accru aux patients, l'eau projetée par le détartreur ultrasonique et la pièce à main d'aéropolissage est chauffée.

AÉROPOLISSAGE

Module et réservoir indépendants

Par sa conception unique, notre module d'aéropolissage est isolé du module principal. Durable et facile à entretenir, il est conçu pour assurer un déroulement fluide et continu des activités de votre clinique.

Buse à jet pour pièce à main parodontale

La buse à jet de la pièce à main parodontale vous permet d'effectuer des traitements précis et ciblés dans les régions gingivales ou sus-gingivales.

Pièce à main d'aéropolissage à buse mince

Notre buse mince facilite l'accès aux régions difficiles à atteindre ou à voir.

Écran intelligent

Notre écran polyvalent est facile à utiliser et affiche uniquement les données dont vous avez besoin pour un maximum de clarté et de concentration.

CONVIVIALITÉ MAXIMALE

DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE

Détartreur ultrasonique

Confort et durabilité.

Chez NSK, la qualité prime. Notre pièce à main de détartrage ultrasonique offre une combinaison hors pair de convivialité, de confort, de durabilité, de commodité, d'accessibilité et de visibilité.


Le Varios Combi Pro2 est équipé de la première pièce à main de détartrage ultrasonique au monde.

Faite de titane pur, à l'épreuve de la chaleur et des produits chimiques, elle est conçue pour résister à de multiples retraitements et stérilisations en autoclave.

Pour vous assurer une prise ferme et stable, notre pièce à main de détartrage reçoit le célèbre fini DURAGRIP*.

Conçu pour offrir des performances exceptionnelles et fabriqué au Japon, le détartréur est équilibré, confortable et durable.

*DURAGRIP est le revêtement résistant aux rayures et à l'abrasion exclusif de NSK

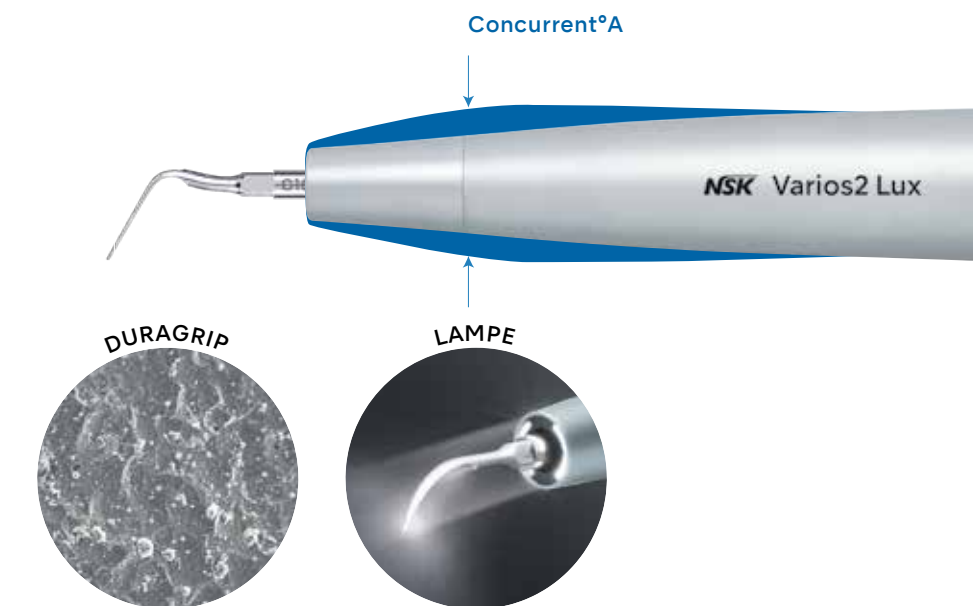


DÉTARTRAGE ULTRASONIQUE

Aéropolissage

Pièces à main minces avec buses interchangeables.


La minceur des pièces à main et des buses assure une visibilité et une maniabilité hors pair dans la cavité buccale, tandis que leur conception ergonomique réduit la fatigue de la main et favorise l'uniformité des soins.

Conçues pour une utilisation quotidienne en clinique, nos buses allongées permettent de travailler en douceur et efficacement aux endroits difficiles à atteindre, comme les régions molaires et les surfaces linguales. Cela contribue à limiter l'écartement des lèvres et à améliorer le confort des patients

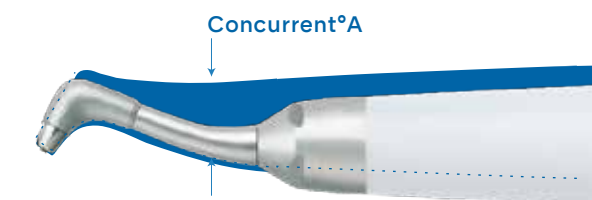

Buse à jet pour pièce à main d'aéropolissage parodontal

La buse à jet a été conçue pour les traitements sus-gingivaux. Il est désormais possible de cibler avec précision la zone à traiter au moyen de cette buse à jet, qui s'ajoute à l'ancienne buse parodontale. Les deux modèles de buses parodontales sont interchangeables et peuvent être utilisées selon les besoins.

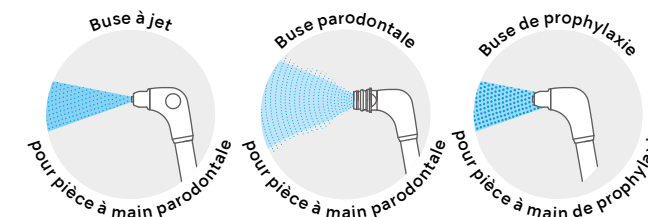


Performance en continu



Modules et réservoirs indépendants

Les pièces à main, la tuyauterie et le réservoir à poudre sont séparés du module principal de manière à vous permettre, au besoin, de détacher les composants individuels au fauteuil.

Cela permet d'effectuer un dépannage rapide de l'appareil sans avoir à le démonter au complet ou à l'envoyer à un centre de réparation. Ainsi, votre cabinet demeure fonctionnel, le temps d'arrêt est limité et vos rendez-vous peuvent s'enchaîner sans interruption.

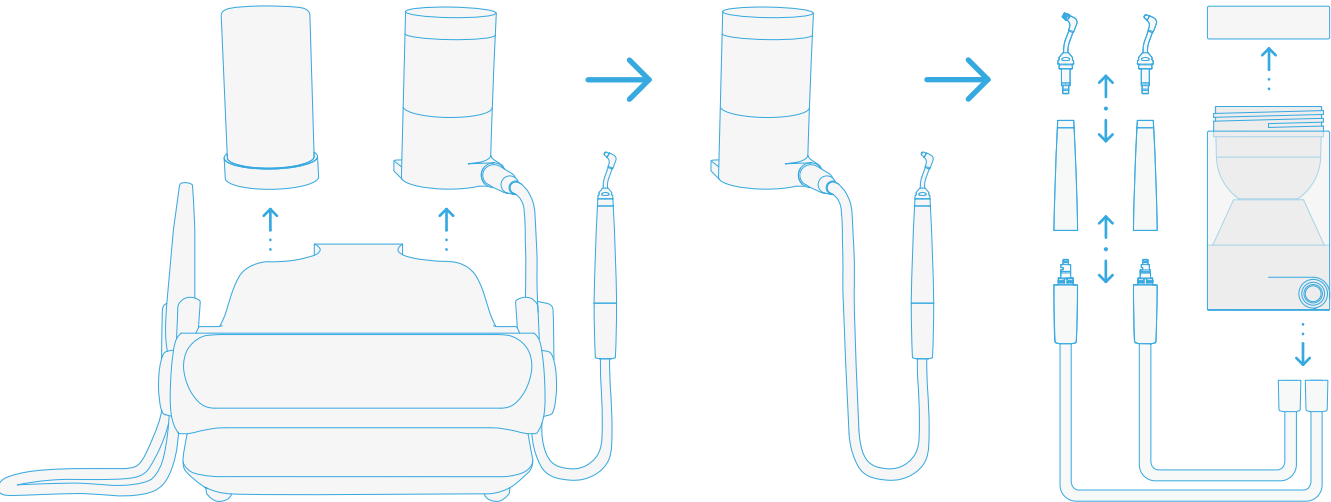

L'intérieur du module principal est conçu intelligemment pour ne comporter que des circuits d'air et d'eau.



Aucun entretien courant n'est requis

Le Varios Combi Pro2 est conçu pour que les cliniciens puissent l'entretenir aisément. Cela limite les temps d'arrêt du cabinet associés à l'entretien courant. Si besoin est, notre équipe de soutien serviable est toujours à votre disposition.

Entretien facile

Nettoyage automatique



L'appareil possède quatre modes de nettoyage automatique que vous pouvez exécuter après chaque patient et en fin de journée, pour un entretien des plus simples.

Ces modes limitent le nombre d'outils requis et contribuent à réduire le risque de colmatage de la poudre ou d'accumulation d'eau, de façon à faciliter le nettoyage entre les utilisations.



Nettoyage automatique
Aéropolisseur



Nettoyage automatique
Aéropolisseur



Nettoyage automatique
Déstarteur à ultrasons



Nettoyage automatique
Double



Mode CLM



Il est facile de nettoyer le circuit interne d'eau au moyen de la bouteille de CLM et du mode CLM. Ce processus permet de décontaminer les conduites d'eau, de prévenir la formation de biofilm et de prolonger l'utilisation quotidienne. Pour plus de sécurité, l'appareil est désactivé jusqu'à ce que la solution de nettoyage soit entièrement éliminée.

Confort des patients

Système de chauffage de l'eau




Le Varios Combi Pro2 comprend un système de chauffage de l'eau pour les pièces à main du détartreur ultrasonique et de l'aéropolisseur. L'eau étant débitée à une température proche de celle de la bouche, le traitement est plus confortable et doux pour les patients, y compris ceux qui souffrent de sensibilité.

Contrôle sans effort

Pédale de contrôle multifonction sans fil

Vous pouvez placer la pédale de contrôle à l'endroit qui vous convient, sans limitation due à la longueur d'un câble ou d'un cordon.

Grâce à sa connectivité Bluetooth^{MD}, la pédale de contrôle du Varios Combi Pro2 assure un fonctionnement fiable en mode mains-libres avec des commandes multifonction conçues pour vous permettre de vous concentrer sur le traitement et non le matériel.

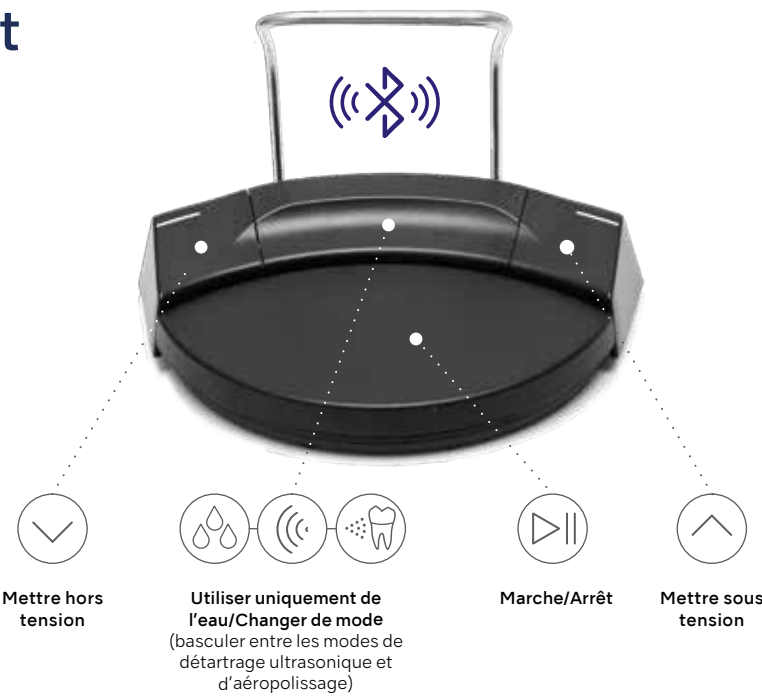


iCart Prophy2 avec trousse de bouteille d'eau

Ce chariot spécialisé vous procure une souplesse d'utilisation accrue en permettant au Varios Combi Pro2 d'utiliser une source autonome d'eau, sans tuyauterie fixe.

Les cliniciens peuvent se déplacer aisément d'un patient ou d'une salle à l'autre, de manière à travailler efficacement même si la disponibilité ou la qualité de l'eau est un souci.

Gamme d'inserts pour détartrateur ultrasonique

Grâce à notre gamme de plus de 70 types d'inserts pour détartrateur ultrasonique, le module de détartrage convient à une vaste gamme de scénarios cliniques, y compris les soins de prévention et le traitement des pathologies dentaires.

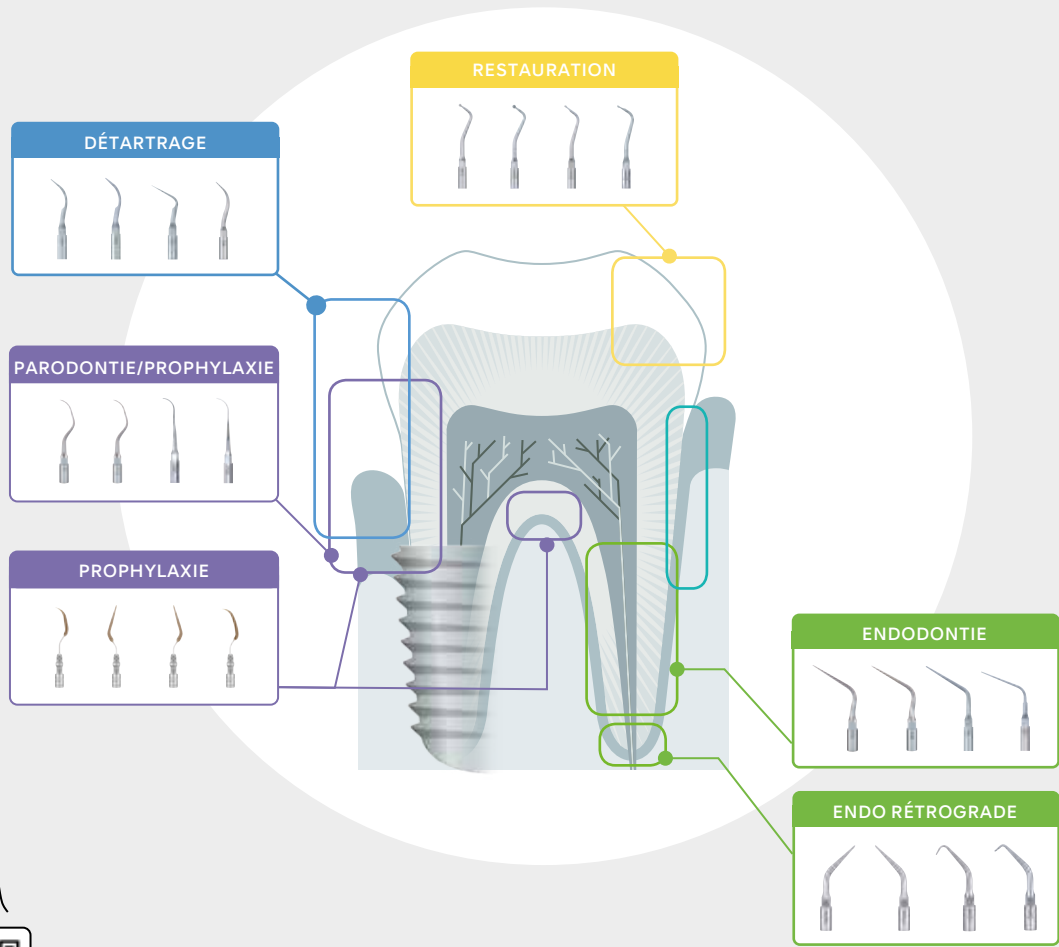

Scannez pour télécharger Guide des astuces

https://www.canadafr.nsk-dental.com/products/oral-hygiene/oral-varios_ultrascaler_tips/

POUDRES



Poudres

Pour des sourires sains et beaux

En utilisant les poudres NSK avec le Varios Combi Pro2, vous pouvez offrir un nouveau niveau de soins professionnels avec des résultats exceptionnels pour vos patients.

FLASH pearl

Poudre de polissage destinée aux régions sus-gingivales, composée de particules sphériques douces pour les surfaces dentaires.

Utilisation prévue°: élimination des taches persistantes

Ingrédient principal°: carbonate de calcium

- sans chlorure de sodium (goût non salé)
- convient aux patients qui suivent un régime hyposodique

Taille moyenne des particules°: 54µm



MODÈLE	CODE DE COMMANDE
FLASH pearl	Y900698
Bouteille de 300°g x 4	

Poudre Perio Mate


Poudre de polissage destinée à la marge gingivale et aux régions sous-gingivales.

Utilisation prévue°: ablation de biofilm et de taches mineures

Ingrédient principal°: glycine

- sans saveur
- goût sucré
- hautement soluble dans l'eau; ne s'accumulera donc pas lorsqu'on l'utilise sous la gencive





Taille moyenne des particules°: 25µm

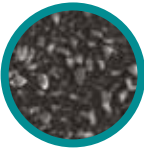

MODÈLE	CODE DE COMMANDE
Perio Mate Powder	Y900938
Bouteille de 160°g x 2	

Aéropolissage

Combinaisons de poudre et de buse, et leurs utilisations

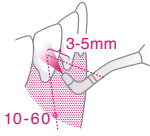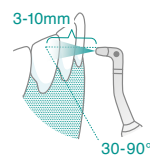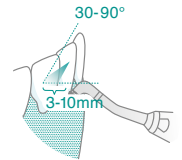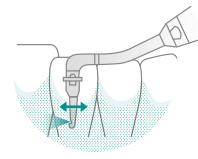MODE	TROUSSE DE POUDRE	PIÈCE À MAIN	BUSE	UTILISATION	POUDRE
MODE DE PROPHYLAXIE	Trousse Prophy2		 Buse de prophylaxie (pour pièce à main de prophylaxie)		
	Trousse Perio2		 Buse à jet (pour pièce à main parodontale)		
MODE DE PARODONTIE	Trousse Perio2		 Buse parodontale (pour pièce à main parodontale)		
	Trousse Perio2		 Buse parodontale + insert (pour pièce à main parodontale))		



Traitement à effraction minimale

Grâce au Varios Combi Pro2, vous êtes en mesure d’offrir les traitements à effraction minimale de NSK, conformément aux lignes directrices de l’ADHA en matière de soins dentaires. Notre système vous aide à promouvoir l’hygiène buccale.

Réalisez les étapes 1, 2 et 4 du protocole de traitement à effraction minimale en utilisant le détartrage ultrasonique et l’aéropolissage pour traiter les régions sus-gingivales et sous-gingivales.



NSK a à cœur de soutenir les soins d’hygiène buccale de qualité supérieure et de créer des appareils de dentisterie conviviaux.

Varios Combi Pro2

Ensemble de base



OPTIQUE	MODÈLE	CODE DE COMMANDE
●	Ensemble de base Varios	Y1501049

- Contenu*:**
 - Module de commande Varios Combi Pro2
 - VA2-LUX-HP Ti
 - VA2-LUX-SC Ti
 - Réservoir Prophy2
 - Tuyau Prophy2
 - Pièce à main d'aéropolissage (prophylaxie)
 - Pédale de commande sans fil
 - Poteau de soutien
 - Tuyau à air
 - Tuyau à eau
 - Cordon d'alimentation
 - Ensemble de bouteille d'irrigation
- Caractéristiques techniques*:**
 - Dimensions (en mm)*: L 249 x P 290 x H 215 (y compris le réservoir)
 - Poids*: 3,5*kg
 - Alimentation*: 100-120*VCA 50/60Hz
 - Fréquence d'excitation (ultrasons)*: 28 à 32*kHz

En option



MODÈLE	CODE DE COMMANDE
Trousse Prophy2	Y1500469

- Contenu**
- Réservoir Prophy2
 - Tuyau Prophy2
 - Pièce à main d'aéropolissage (prophylaxie)
 - Poudre FLASH pearl (300*g)
- * Compris dans l'ensemble de base Varios Combi Pro2



MODÈLE	CODE DE COMMANDE
Trousse Perio2	Y1500470

- Contenu*:**
- Réservoir Perio2
 - Tuyau Perio2
 - Pièce à main d'aéropolissage (parodontie)
 - Embouts de buse Perio*Mate (40*pièces)
 - Outil pour enlever l'embout de buse
 - Poudre Perio*Mate (160*g)

Articles optionnels

MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

iCart Prophy2
Dimensions*: H 840*mm
Poids*: 16*kg



Y1500697

Disponible en février 2027

MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

VA2-LUX-HP Ti **EA1203X050**



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Ensemble CLM **Y1500740**
Contenu*:

- Raccord CLM Perio
- Raccord CLM Prophy



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Pièce à main d'aéropolissage **T1074001**
(pour prophylaxie)



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Pièce à main d'aéropolissage **T1077001**
(pour parodontie)



Pièces de rechange

MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Buse **T1074012**
(pour prophylaxie)



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Buse **T1077012**
(pour parodontie)



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Buse à jet **TA10770106**
(pour parodontie)



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Ensemble de bouteille d'irrigation **ZA16360001**
(pour trousse de bouteille d'eau)



MODÈLE	PRODUIT	CODE DE COMMANDE
--------	---------	------------------

Ensemble de bouteille de CLM **ZA16370001**
(pour trousse de bouteille d'eau)



Lavable en thermodésinfecteur



Autoclavable*

Fabricant

NAKANISHI INC. www.nsk-dental.com
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

NSK America Corp. www.nskdental.com
1800 Global Parkway, Hoffman Estates, IL 60192, USA

Les caractéristiques techniques des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Create it 