


Create it 

GUIDE D'INSERTS

DÉTARTREURS ULTRASONIQUES


NSK

NSK offre
une vaste gamme d'inserts de
détarteurs ultrasoniques VARIOS
pour des applications cliniques.

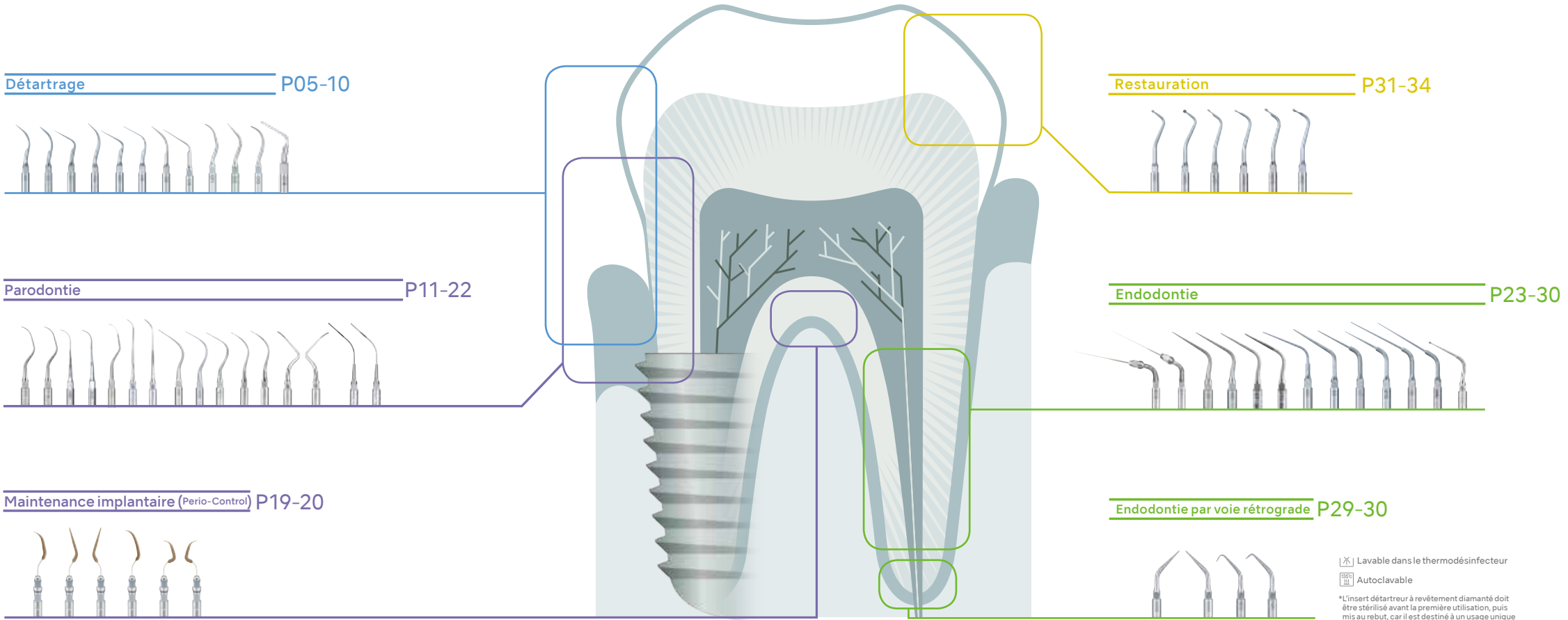

Inserts Varios2/Varios

Les inserts NSK sont compatibles avec les pièces à main des détartreurs ultrasoniques Varios et Varios2.
Le présent guide illustre l'ensemble des inserts Varios de NSK, leurs applications et leur connectivité.

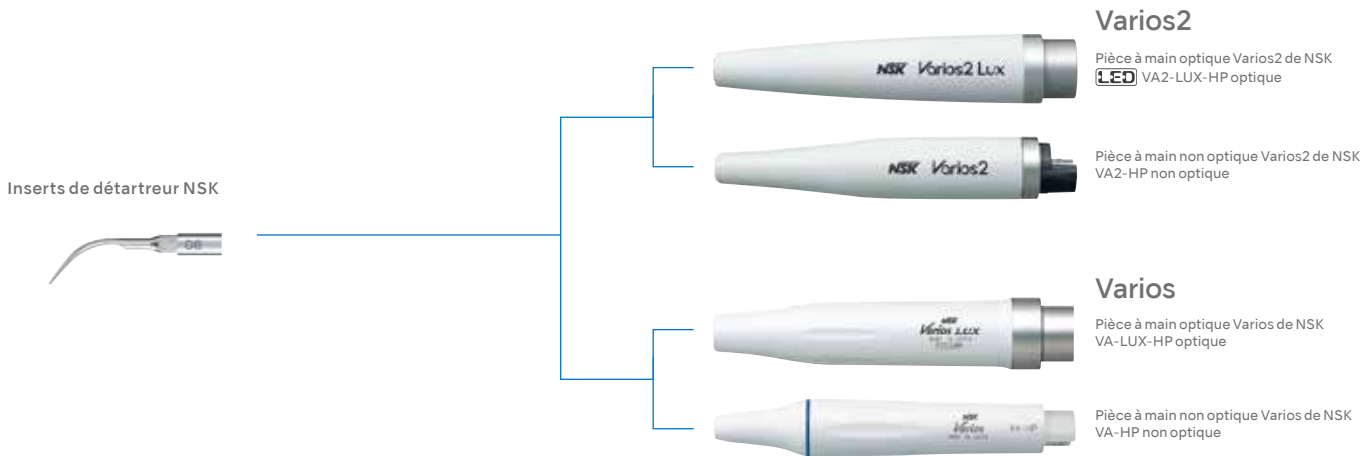

Comment bien utiliser le détartreur à ultrasons

Le détartreur à ultrasons NSK élimine et détruit le biofilm bactérien, en plus de retirer efficacement le tartre grâce aux vibrations ultrasoniques et au phénomène de cavitation.

POINT 1 Application correcte de l'insert sur la dent

Le détartreur à ultrason piézoélectrique de NSK est un appareil doté d'un insert qui effectue un mouvement linéaire alternatif. L'insert génère divers niveaux de puissance selon la partie appliquée sur la dent, ce qui engendre un impact et des résultats variables. Pour un résultat efficace, il est généralement préconisé d'appliquer la partie latérale de l'insert, à 2 ou 3 mm de l'extrémité.

POINT 2 Angle formé par l'insert

L'insert doit être appliqué sur la surface de la dent à un angle de 15 degrés ou moins, les derniers 2 à 3 mm de l'insert étant en contact avec la dent. L'extrémité de l'insert (la partie la plus puissante) ne doit pas être appliquée à la surface de la dent, car cela pourrait entraîner une sensibilité dentaire et un inconfort.


POINT 3 Force d'application et déplacement de l'insert

La force appliquée par l'insert sur la dent doit être très légère. La façon la plus efficace de retirer le tartre consiste à effectuer de petits mouvements chevauchants tout en maintenant les derniers 2 à 3 mm de l'insert en contact avec la dent. Pour retirer un gros amas de tartre dur, on peut appliquer l'extrémité de l'insert pour commencer à le fractionner. Il faut prendre soin de ne pas placer l'extrémité de l'insert contre la dent, car cela pourrait l'endommager. Le fait de ne pas maintenir l'insert en mouvement ou d'appliquer une force excessive sur la surface de la dent peut endommager celle-ci et/ou causer un inconfort. Cela atténue également le mouvement de l'insert et diminue l'efficacité de l'appareil.

POINT 4 Réglage de la puissance


Le réglage de la puissance dépend de l'état de la cavité buccale. Il est recommandé de commencer par un réglage à faible puissance et de l'augmenter graduellement selon l'état de la cavité buccale, et ce, tout en maintenant le réglage de puissance le plus bas pour retirer efficacement le tartre et le biofilm.



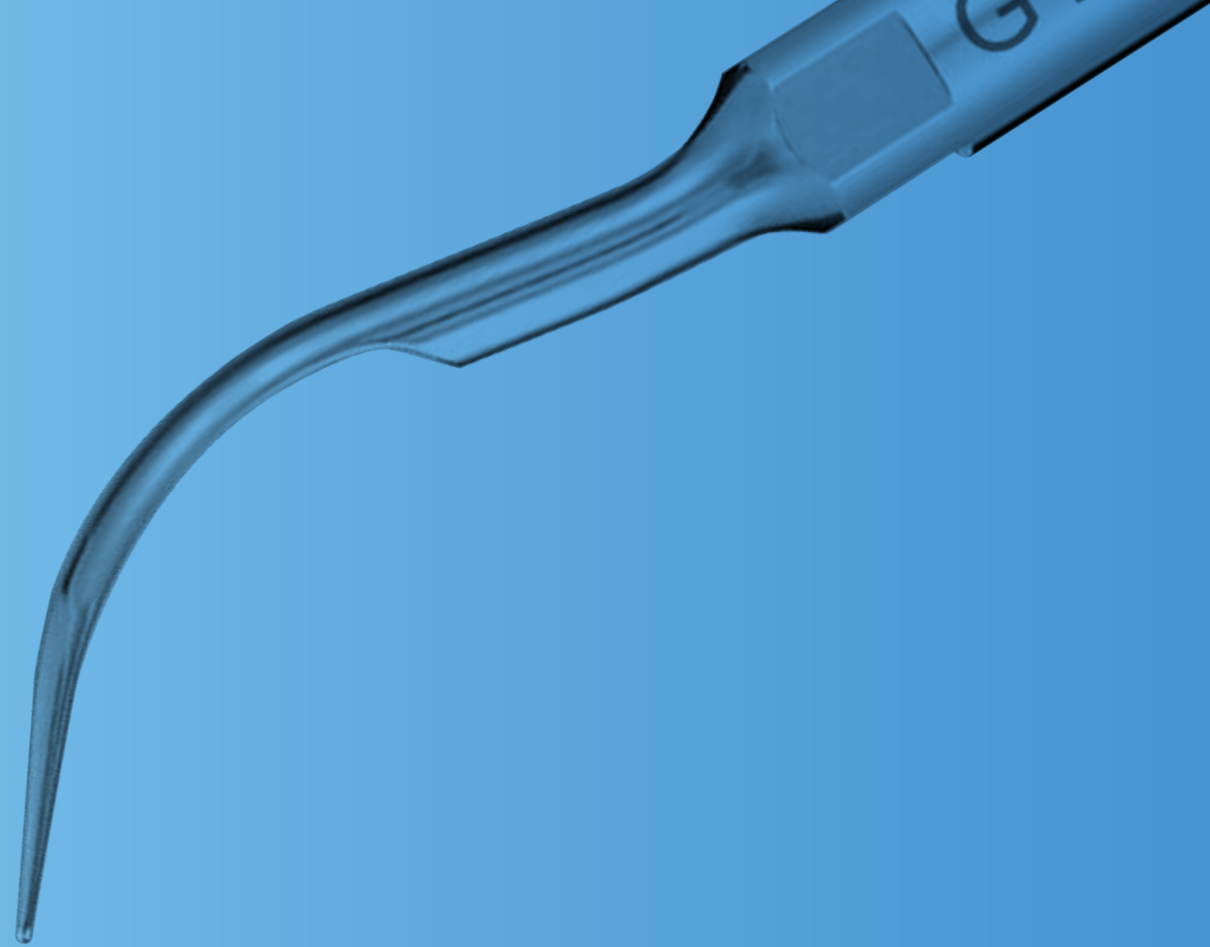

DÉTARTRAGE

DÉTARTRAGE

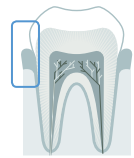

MODÈLE **G1**

- Élimination du tartre supragingival et à la marge gingivale
- Élimination du tartre dans les espaces interdentaires étroits

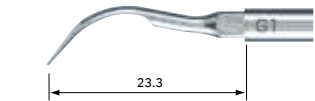


Diagramme en coupe transversale

CODE DE COMMANDE **Z217101**



MODÈLE **G2**

- Élimination du tartre supragingival



Diagramme en coupe transversale

CODE DE COMMANDE **Z217102**



MODÈLE **G3**

- Élimination du tartre supragingival

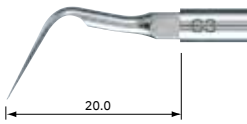


Diagramme en coupe transversale

ODE DE COMMANDE **Z217103**



MODÈLE **G4**

- Élimination du tartre supragingival et à la marge gingivale

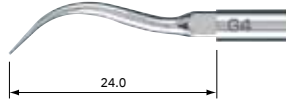


Diagramme en coupe transversale

DE DE COMMANDE **Z217104**



MODÈLE **G5**

- Élimination du tartre supragingival
- Élimination du tartre dans les espaces interdentaires étroits
- Élimination du tartre à la marge gingivale
- Élimination du biofilm gingival dans le sulcus ou la poche gingivale.

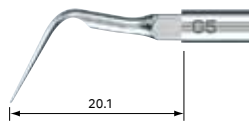


Diagramme en coupe transversale

DE DE COMMANDE **Z217105**



MODÈLE **G6**

- Élimination du tartre supragingival
- Élimination du tartre dans les espaces interdentaires étroits
- Élimination du tartre à la marge gingivale
- Élimination du biofilm gingival dans le sulcus ou la poche gingivale.

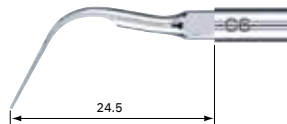



Diagramme en coupe transversale

CODE DE COMMANDE **Z217106**




* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est quatre fois plus grand que la taille réelle.

DÉTARTRAGE

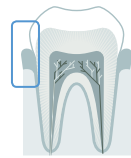

MODÈLE **G8**

- Élimination du tartre supragingival et à la marge gingivale
- Élimination du tartre dans les espaces interdentaires étroits

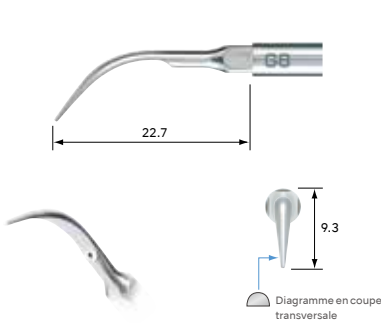

CODE DE COMMANDE **Z217108**



MODÈLE **G9**

- Élimination du tartre supragingival
- Élimination du tartre dans les espaces interdentaires étroits
- Élimination du tartre à la marge gingivale
- Élimination du biofilm gingival dans le sulcus ou la poche gingivale.




CODE DE COMMANDE **Z217109**



MODÈLE **G11**

- Élimination du tartre supragingival

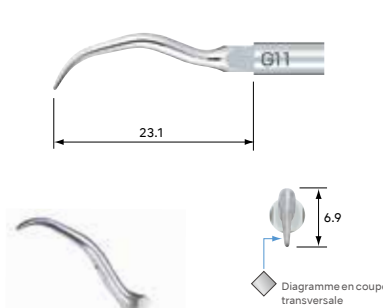


CODE DE COMMANDE **Z217411**



MODÈLE **G12**

- Élimination du tartre supragingival

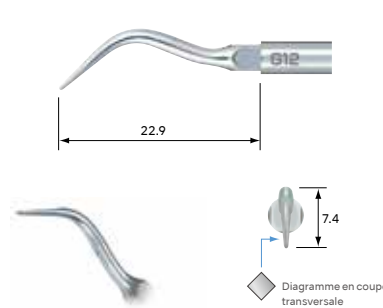


CODE DE COMMANDE **Z217412**



MODÈLE **G13**

- Élimination du tartre supragingival

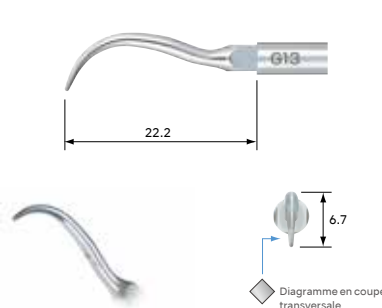


CODE DE COMMANDE **Z217413**



MODÈLE **G16**


- Élimination du tartre supragingival
- Élimination du tartre dans les espaces interdentaires étroits
- Élimination du tartre à la marge gingivale
- Élimination du biofilm sous-gingival

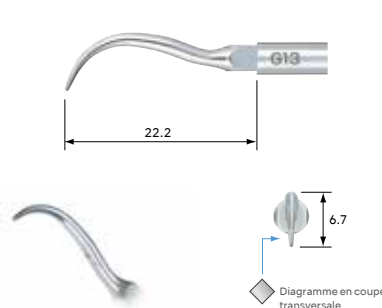


CODE DE COMMANDE **Z217120**



* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est quatre fois plus grand que la taille réelle.

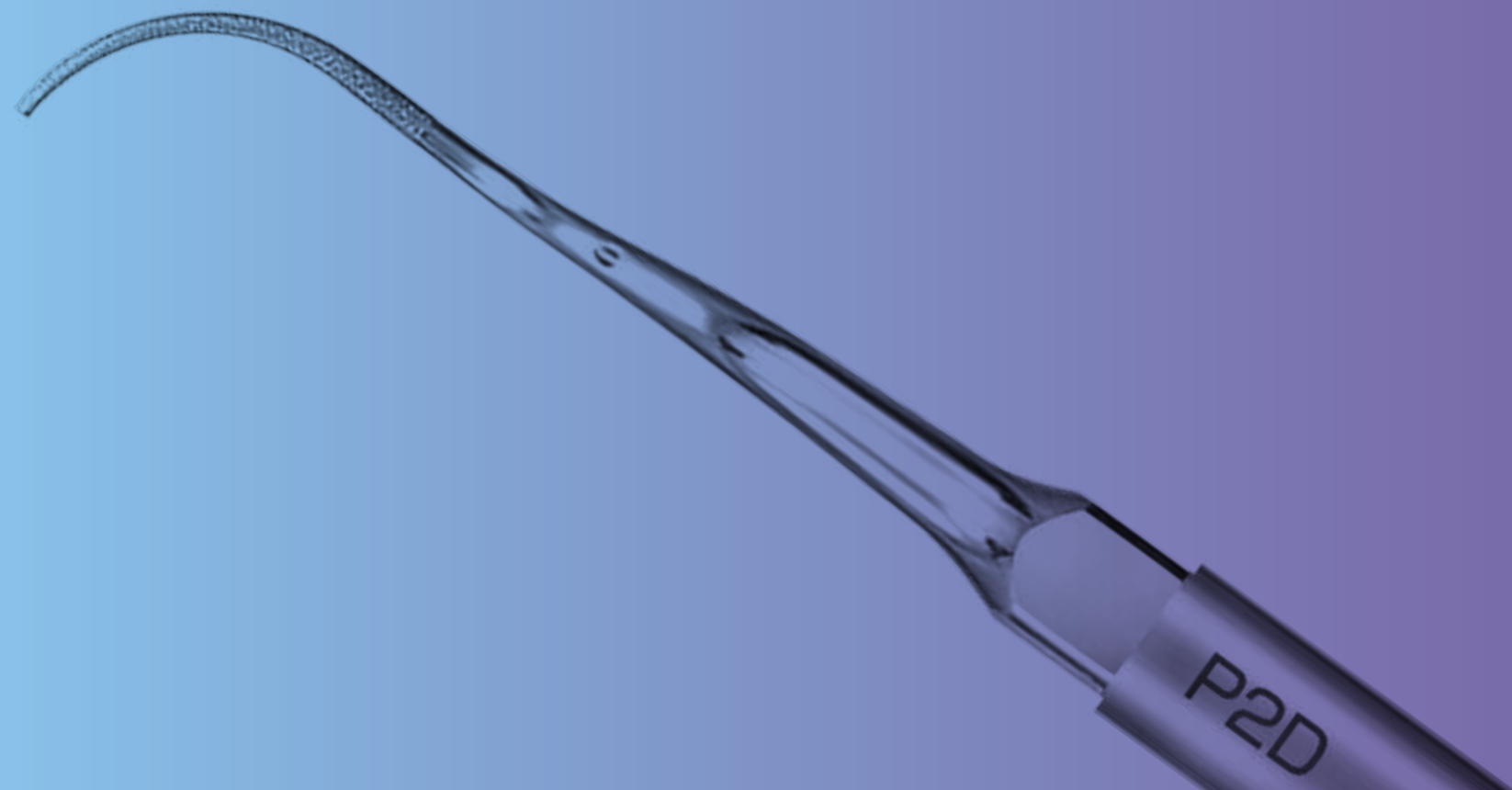


PARODONTIE

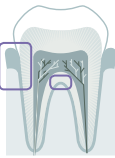

MODÈLE **P1**


- Élimination du biofilm supragingival et sous-gingival, ainsi que du tartre très léger dans les poches profondes étroites et les espaces interproximaux serrés

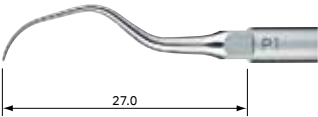

CODE DE COMMANDE **Z217404**

MODÈLE **P1D**

- Élimination du tartre sous-gingival tenace dans les poches profondes étroites et les espaces interproximaux serrés
- Débridement parodontal

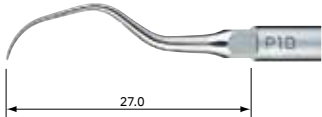

CODE DE COMMANDE **A1012972**



- Usage unique • Revêtement diamanté



* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est quatre fois plus grand que la taille réelle.

MODÈLE **P2D**

- Élimination du tartre sous-gingival tenace dans les poches profondes étroites et les espaces interproximaux serrés
- Débridement parodontal

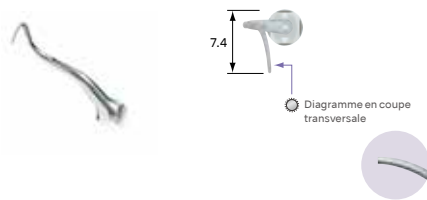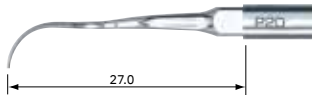


CODE DE COMMANDE **A1012970**

- Usage unique • Revêtement diamanté
- Type incurvé à droite



MODÈLE **P3D**

- Élimination du tartre sous-gingival tenace dans les poches profondes étroites et les espaces interproximaux serrés
- Débridement parodontal

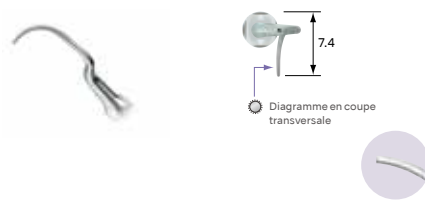



CODE DE COMMANDE **A1012971**

- Usage unique • Revêtement diamanté
- Type incurvé à gauche





P2D / P3D (vu du dessus)

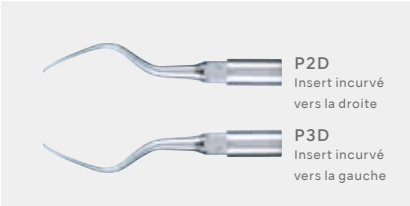

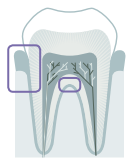

MODÈLE **P10**

- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival
- Élimination du tartre sous-gingival dans les poches étroites et les espaces interproximaux
- Élimination du tartre à la marge gingivale

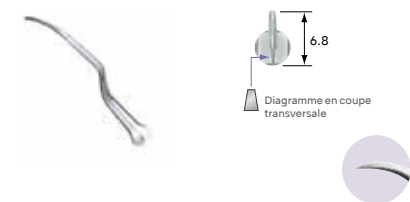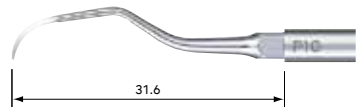


CODE DE COMMANDE **Z217410**

- Bord affûté



MODÈLE **P11R**

- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival
- Élimination du tartre sous-gingival dans les poches étroites et les espaces interproximaux
- Débridement parodontal des zones de furcation

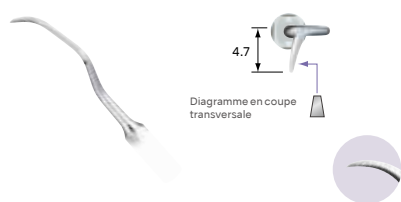



CODE DE COMMANDE **Z217408**

- Bord affûté
- Type incurvé à droite



MODÈLE **P11L**

- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival
- Élimination du tartre sous-gingival dans les poches étroites et les espaces interproximaux
- Débridement parodontal des zones de furcation

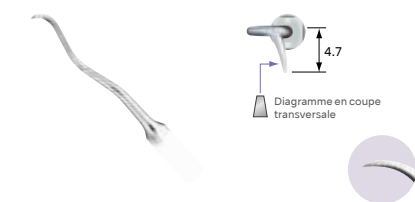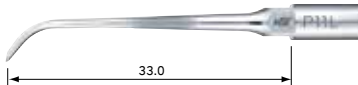


CODE DE COMMANDE **Z217409**

- Bord affûté
- Type incurvé à gauche



MODÈLE **P20**

- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival léger

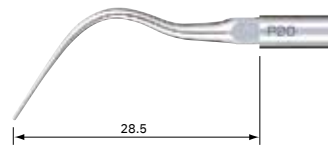


CODE DE COMMANDE **Z217420**



MODÈLE **P21R**

- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival léger

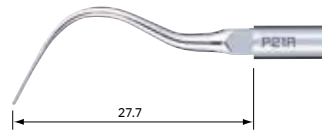


CODE DE COMMANDE **Z217422**

- Type incurvé à droite



MODÈLE **P21L**


- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival léger

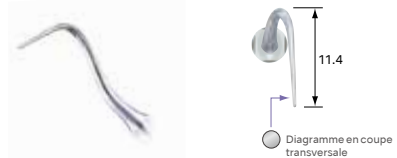

CODE DE COMMANDE **Z217421**

- Type incurvé à gauche







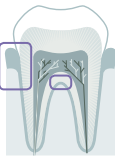

MODÈLE **P25R**

MODÈLE **P25L**

- Élimination du biofilm des zones de furcation

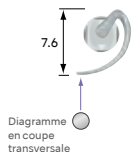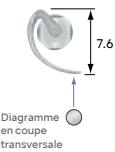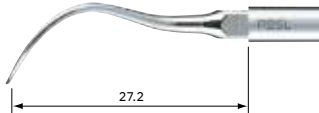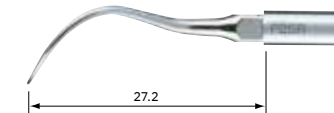

CODE DE COMMANDE **Z217424**

CODE DE COMMANDE **Z217425**


- Type incurvé à droite

- Type incurvé à gauche



* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est quatre fois plus grand que la taille réelle.






P11R / P11L / P21R / P20 / P21L (vu du dessus)

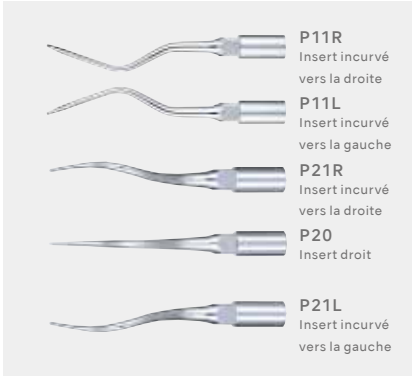

MODÈLE **P26R**

MODÈLE **P26L**

- Élimination du biofilm et du tartre supragingival et sous-gingival
- Élimination du tartre sous-gingival dans les espaces interproximaux serrés
- Élimination du biofilm gingival des zones de furcation

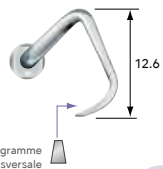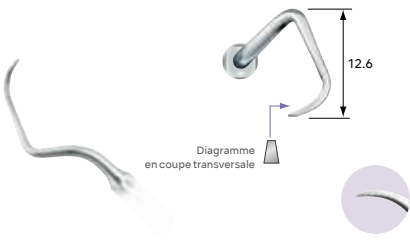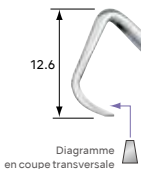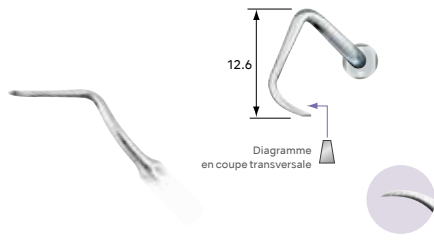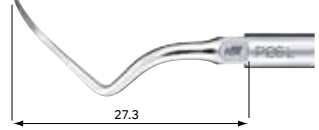

CODE DE COMMANDE **Z217426**


CODE DE COMMANDE **Z217427**

- Bord affûté
- Type incurvé à droite


- Bord affûté
- Type incurvé à gauche







P25R / P25L / P26R / P26L (From above)


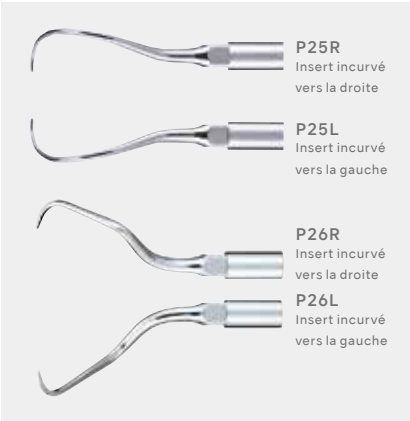


PARODONTIE (Maintenance implantaire)

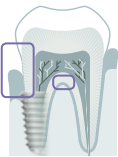

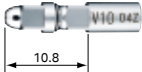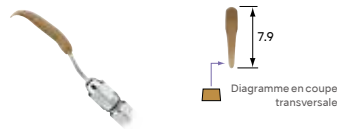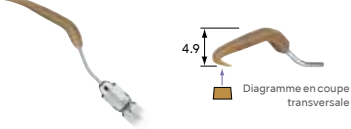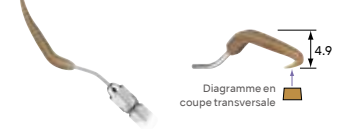MODÈLE V10	MODÈLE V-P10	MODÈLE V-P11R	MODÈLE V-P11L
	Pour la maintenance implantaire : Produit à partir de matériaux spéciaux qui permettent un débridement sécuritaire sans endommager les implants.	Les inserts V-P11R/L droit et gauche sont dotés d'une double courbure dans la tige de l'instrument. Ces très longs inserts permettent d'accéder facilement aux zones difficiles à atteindre et d'éviter toute interférence avec les dents ou les contours adjacents. Leur forme a été conçue pour s'adapter aux différentes morphologies dentaires, ce qui en fait des inserts polyvalents pour un large éventail d'utilisations allant des dents antérieures aux zones prémolaires.	
	  Diagramme en coupe transversale	  Diagramme en coupe transversale	  Diagramme en coupe transversale
CODE DE COMMANDE Z217041	CODE DE COMMANDE Y900184	CODE DE COMMANDE Y1002165	CODE DE COMMANDE Y1002166
• Comprend une clé de remplacement pour l'insert E * Embout en plastique non inclus	• Emballage de 3 * Support V10 non inclus	• Emballage de 3 • Type incurvé à droite * Support V10 non inclus	• Emballage de 3 • Type incurvé à gauche * Support V10 non inclus
			

* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert 18 est quatre fois plus grand que la taille réelle.

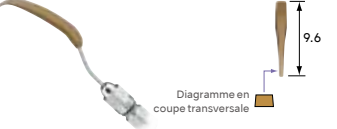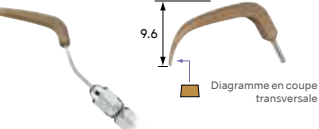MODÈLE V-P12	MODÈLE V-P26R	MODÈLE V-P26L
L'insert V-P12 est une version plus longue du populaire insert V-P10. Il sert à une vaste gamme d'applications, notamment l'entretien des implants et d'autres prothèses. Sa forme permet d'accéder facilement à toutes les zones de traitement.	Les inserts V-P26R/L sont des inserts à double courbure. Les grands angles permettent d'accéder aux zones qui ne peuvent pas être atteintes avec des inserts V-P11R/L ou d'autres instruments conventionnels. Ces inserts conviennent parfaitement pour accéder aux surfaces distales des molaires et des angulaires, car l'extrémité de l'insert s'adapte très étroitement à la morphologie des dents.	
  Diagramme en coupe transversale	  Diagramme en coupe transversale	  Diagramme en coupe transversale
CODE DE COMMANDE Y1002167	CODE DE COMMANDE Y1002168	CODE DE COMMANDE Y1002169
• Emballage de 3 * Support V10 non inclus	• Emballage de 3 • Type incurvé à droite * Support V10 non inclus	• Emballage de 3 • Type incurvé à gauche * Support V10 non inclus
		

Voir le guide de puissance aux pages 35 à 36.




PARODONTIE (Irrigation et nettoyage)

Pour un nettoyage efficace après un débridement ou un détartrage. *Aucun effet de détartrage.

MODÈLE **P40**

MODÈLE **P41**

Peut être utilisé sans danger pour l'irrigation dans la poche parodontale. Les inserts sont codés par couleur pour indiquer la profondeur avec des marquages à 6 et 9 mm.

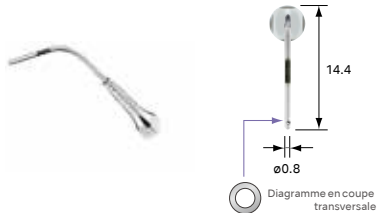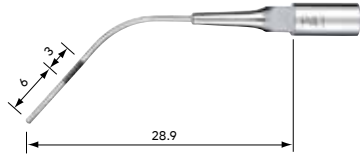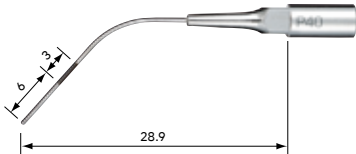

CODE DE COMMANDE **Z217550**

CODE DE COMMANDE **Z217555**

• Diamètre de l'insert : 0,6 mm


• Diamètre de l'insert : 0,8 mm



Double point d'irrigation


- Double irrigation située sur les zones latérales de la pointe
- Nettoyage efficace quel que soit l'angle d'insertion
- La forme arrondie de la pointe de l'insert permet d'entrer en toute sécurité dans la poche parodontale..

* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est quatre fois plus grand que la taille réelle.

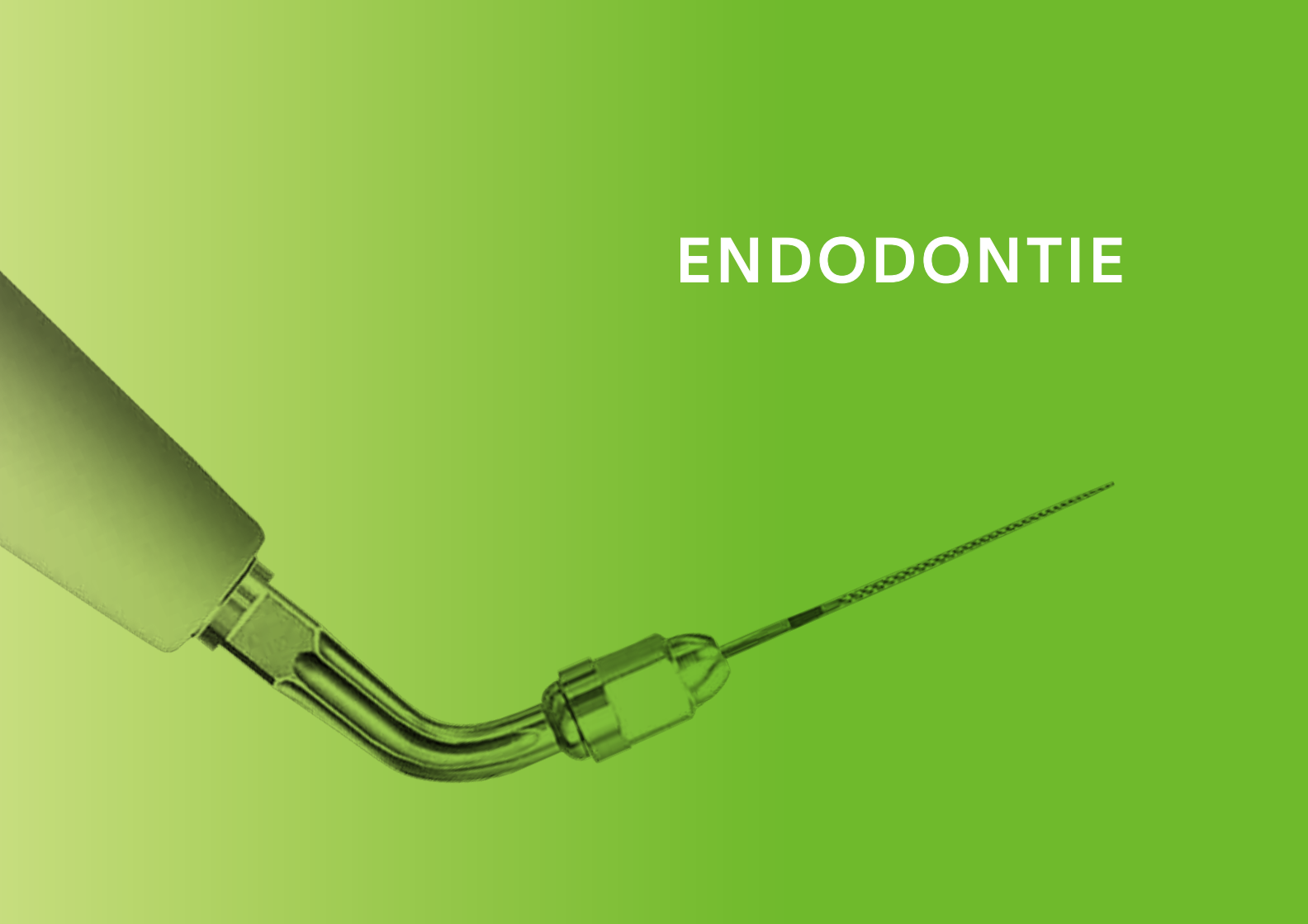


ENDODONTIE

ENDODONTIE

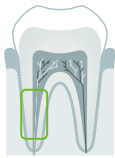

MODÈLE E4

- Nettoyage du canal radicaire et élimination des corps étrangers


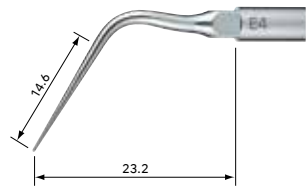


CODE DE COMMANDE **Z217428**

- Diamètre de l'insert : $\varnothing 0,6$ mm

MODÈLE E4D

- Nettoyage et agrandissement du canal radicaire

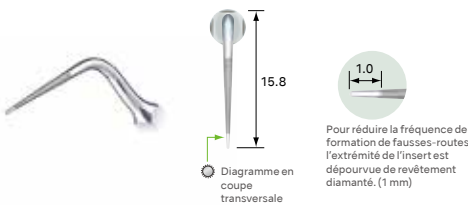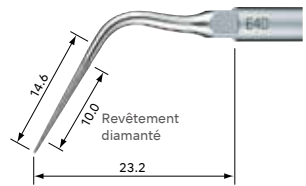


CODE DE COMMANDE **A1012973**

- Usage unique • Revêtement diamanté




MODÈLE E9

- Nettoyage du canal radicaire et élimination des corps étrangers


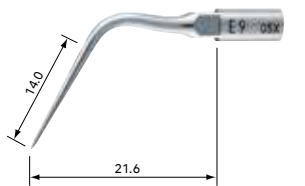


CODE DE COMMANDE **Z217314**

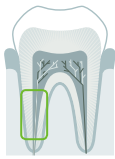

MODÈLE **E9D**

- Nettoyage et agrandissement du canal radulaire

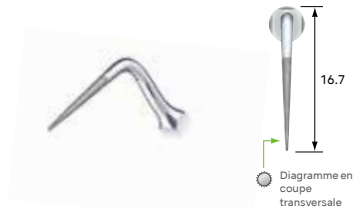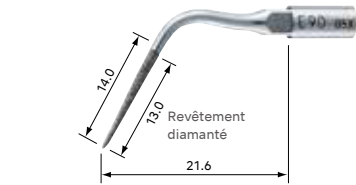


CODE DE COMMANDE **A1012969**

- Usage unique • Revêtement diamanté

MODÈLE **E5**

- Condensation latérale

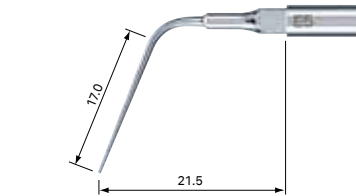


CODE DE COMMANDE **Z217305**

- Sans irrigation

MODÈLE **E6**

- Condensation latérale

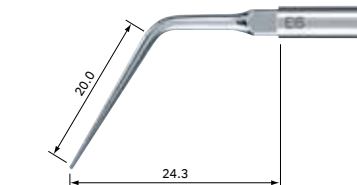

CODE DE COMMANDE **Z217306**

- Sans irrigation

MODÈLE **E7**

- Élimination de l'amalgame et des corps étrangers



CODE DE COMMANDE **Z217307**

- Sans irrigation


MODÈLE **E7D**

- Agrandissement de la paroi du canal radulaire



CODE DE COMMANDE **A1012966**

- Usage unique • Revêtement diamanté

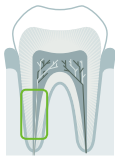

MODÈLE **E8**

- Élimination de l'amalgame et des corps étrangers



CODE DE COMMANDE **Z217308**

- Sans irrigation



MODÈLE **E8D**

- Agrandissement de la paroi du canal radulaire



CODE DE COMMANDE **A1012967**

- Usage unique • Revêtement diamanté

MODÈLE **E15D**

- Pour localiser les canaux radiculaire et éliminer les calcifications




CODE DE COMMANDE **A1012968**

- Usage unique • Revêtement diamanté



MODÈLE **E11**


- Support pour limes en U (angle 120°)

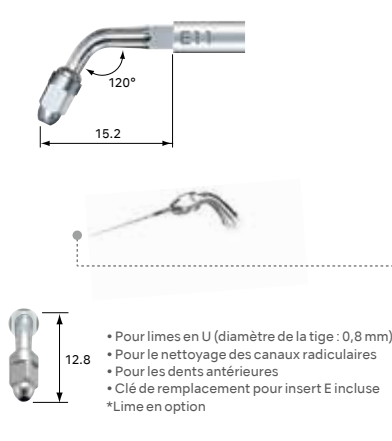

CODE DE COMMANDE **Z217031**


Consultez toujours ce tableau de référence pour vous assurer que la longueur de la lime est exacte et appropriée afin d'éviter la rupture de l'instrument.

		#15	#20	#25	#30	#35
E11	Varios2	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
	Varios	22-23 mm	22-23 mm	23-25 mm	23-25 mm	24-26 mm
E12	Varios2	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm
	Varios	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm

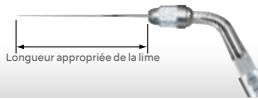

MODÈLE **E12**

- Support pour limes en U (angle 95°)

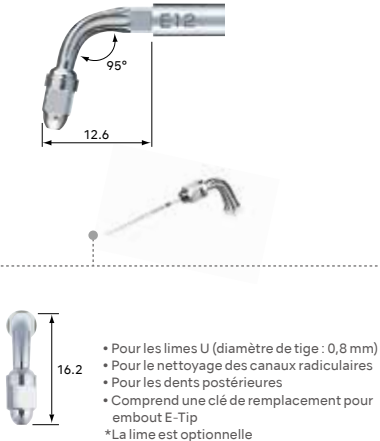

CODE DE COMMANDE **Z217032**

MODÈLE **Limes en U**

Longueur : 33 mm Diamètre de la tige : 0,8 mm

MODÈLE **Limes en U 33mm ISO 15** CODE DE COMMANDE
• ISO15 • Paquet de 6 **Y900062**

MODÈLE **Limes en U 33mm ISO 20** CODE DE COMMANDE
• ISO20 • Paquet de 6 **Y900063**

MODÈLE **Limes en U 33mm ISO 25** CODE DE COMMANDE
• ISO25 • Paquet de 6 **Y900064**

MODÈLE **Limes en U 33mm ISO 30** CODE DE COMMANDE
• ISO30 • Paquet de 6 **Y900065**


MODÈLE **Limes en U 33mm ISO 35** CODE DE COMMANDE
• ISO35 • Paquet de 6 **Y900066**

ENDODONTIE PAR VOIE RÉTROGRADE

L'insert recouvert d'un revêtement diamanté microscopique permet d'éliminer efficacement la dentine au niveau de la pointe. Deux types d'inserts angulés (90°, 70°) sont disponibles pour les dents antérieures et deux autres types d'inserts incurvés (vers la droite et vers la gauche) sont disponibles pour les molaires.

MODÈLE **E30RD** MODÈLE **E30LD**

- L'insert à revêtement diamanté permet une préparation efficace de la cavité.

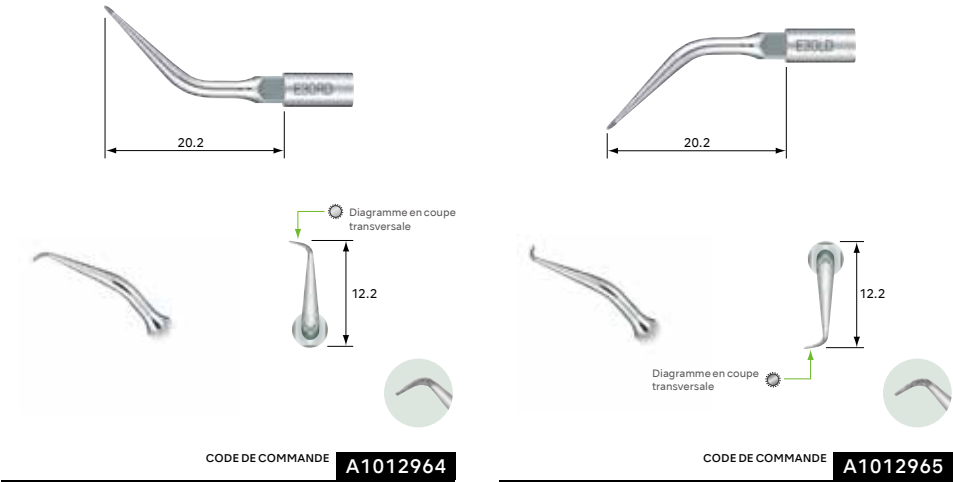


- Usage unique • Revêtement diamanté
- Pour les dents postérieures (à angle droit)

- Usage unique • Revêtement diamanté
- Pour les dents postérieures (à angle gauche)




* Le diagramme de section transversale est l'image d'un point situé à 1 mm de l'extrémité. Le diagramme illustré de l'insert est quatre fois plus grand que la taille réelle.

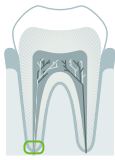

MODÈLE **E31D** MODÈLE **E32D**

- L'insert à revêtement diamanté permet une préparation efficace de la cavité.

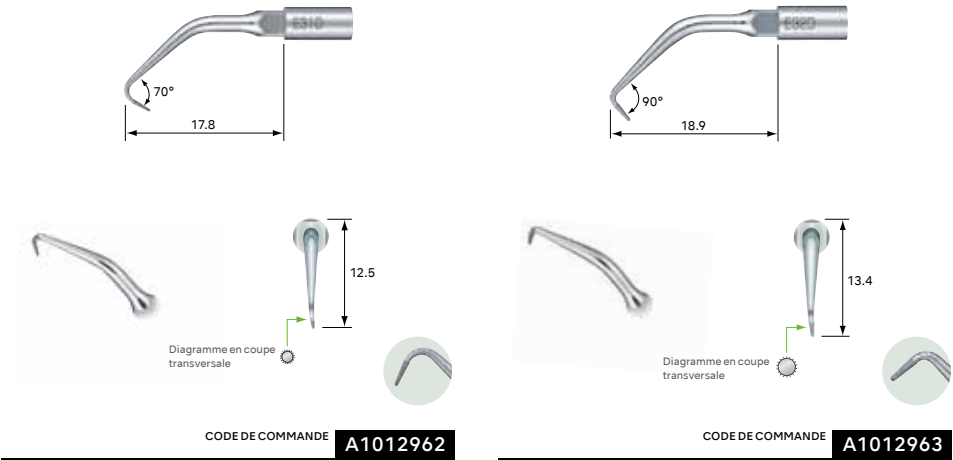

- Usage unique • Revêtement diamanté
- Pour les dents antérieures et postérieures (70°)


- Usage unique • Revêtement diamanté
- Pour les dents antérieures (90°)

Voir le guide de puissance aux pages 35 à 36.

RESTAURATION




RESTAURATION

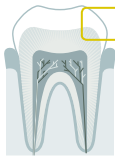

MODÈLE **G61D**

MODÈLE **G62D**

• Insert à revêtement diamanté avec extrémité sphérique
(Saignement rare)

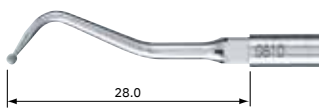


CODE DE COMMANDE **A1012974**

CODE DE COMMANDE **A1012975**

• Usage unique • Revêtement diamanté

• Usage unique • Revêtement diamanté



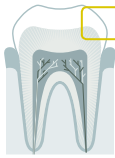


MODÈLE **G65D**

- Élimination des caries interproximales (L'extrémité hémisphérique de l'insert ne permet pas de couper une dent saine.)




CODE DE COMMANDE **A1012976**

- Usage unique • Revêtement diamanté

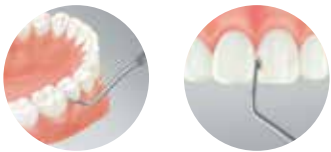

MODÈLE **G66D**

- Élimination des caries interproximales avec une extrémité coupante sécurisée

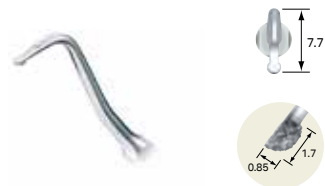

CODE DE COMMANDE **A1012977**

- Usage unique • Revêtement diamanté



MODÈLE **G67D**

- Pour les caries proximales interdentaires des molaires (L'extrémité hémisphérique de l'insert ne permet pas de couper une dent saine.)



CODE DE COMMANDE **A1012978**

- Usage unique • Revêtement diamanté



MODÈLE **G68D**

- Pour caries proximales antérieures (Seule la dentine dégradée peut être éliminée, comme pour les molaires)



CODE DE COMMANDE **A1012979**

- Usage unique • Revêtement diamanté



GUIDE DE PUISSANCE

N° DE L'INSERT	NSK	
	Varios2 970/370	Varios 750/560/350
DÉTARTRAGE		
G1	G 7	G 3
G2	G 7	G Max
G3	G 7	G 3
G4	G 5	G 3
G5	G 6	G 3
G6	G 8	G 1
G8	G 7	G 3
G9	G 5	G 1
G11	G 6	G 3
G12	G 7	G 3
G13	G 6	G 3
G15	G 6	G 3
PARODONTIE/ENTRETIEN		
P1	P 6	P 2
P1D	P 10	P 2
P2D	P 8	P 4
P3D	P 8	P 4


N° DE L'INSERT	NSK	
	Varios2 970/370	Varios 750/560/350
P10	P 10	P Max
P11R	P 10	P Max
P11L	P 10	P Max
P20	P 8	P 4
P21R	P 8	P 4
P21L	P 8	P 4
P25R	P 10	P 4
P25L	P 10	P 4
P26R	P 6	P 3
P26L	P 6	P 3
P40	P 3	P 1
P41	P 3	P 1
V-P10	P 6	P 3
V-P11R	P 6	P 3
V-P11L	P 6	P 3
V-P12	P 6	P 3
V-P26R	P 6	P 3

N° DE L'INSERT	NSK	
	Varios2 970/370	Varios 750/560/350
V-P26L	P 6	P 3
ENDODONTIE		
E4	E 6	E 3
E4D	E 7	E 3
E5	E 10	E 3
E6	E 10	E 4
E7	E 6	E Max
E7D	E 6	E Max
E8	E 2	E 4
E8D	E 2	E 4
E9	E 6	E 4
E9D	E 7	E 4
E15D	E 6	E 3
E11	E 4	E 3
E12	E 3	E 3
E30RD	E 6	E 3
E30LD	E 6	E 3


N° DE L'INSERT	NSK	
	Varios2 970/370	Varios 750/560/350
E31D	E 6	E 3
E32D	E 6	E 3
RESTAURATION		
G61D	G 2	G 2
G62D	G 2	G 3
G65D	G 2	G 2
G66D	G 2	G 2
G67D	G 2	G 3
G68D	G 2	G 3

Plage de puissance applicable pour les inserts Varios de NSK lorsqu'ils sont utilisés avec un détartreur ultrasonique Varios et.

Varios2

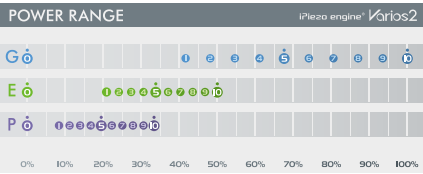

Varios

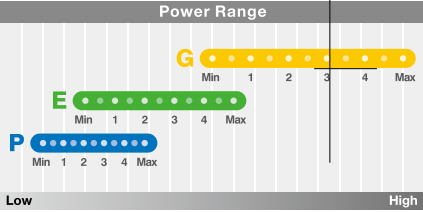

- <Attention>
- Consultez toujours le manuel d'utilisation et les fiches jointes avant utilisation.
 - Utilisez toujours le mode de puissance et la plage de puissance appropriés pour chaque insert individuel.
 - Utilisez toujours avec une irrigation suffisante pour éviter la production excessive de chaleur pendant le traitement.
 - Démarrez toujours avec un réglage de puissance inférieur, puis régler sur un réglage plus élevé si nécessaire.
 - Veuillez toujours à ce que les inserts soient bien serrés à l'aide de la clé appropriée et que l'alimentation soit

* Une manœuvre inappropriée peut provoquer la rupture de l'insert, même si celui-ci est utilisé dans la plage de puissance recommandée. Consultez le mode d'emploi avant utilisation.

Carte d'évaluation de l'usure des inserts Varios

- Guide facile à utiliser pour évaluer l'usure des inserts

Les embouts ultrasoniques s'usent avec une utilisation répétée. Lorsque les embouts s'usent, le schéma de vibration change et ils perdent en efficacité. Une usure de 2 mm correspond à une réduction de 50 % de l'efficacité de l'embout. Il est important de vérifier régulièrement l'usure des embouts et, au besoin, les remplacer conformément au guide des embouts.



Comment utiliser la carte d'évaluation de l'usure des inserts Varios

1. Placez le cou de l'insert dans l'encoche.
2. Vérifiez l'usure de l'insert
3. Voir les lignes verte, jaune et rouge pour vérifier l'usure de l'insert

*Voir ci-dessous ce que signifie chaque couleur

NSK recommande de remplacer un insert lorsque celui-ci atteint la ligne jaune (usure de 1 mm) pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Vert : Aucune usure – L'insert est normal.

Le remplacement de l'insert n'est pas nécessaire.



OK

Jaune : Usure de 1 mm - L'insert présente une certaine usure.

Le remplacement de l'insert est recommandé.



⚠

Rouge : Usure de 2 mm - L'insert est très usé.

Le remplacement de l'insert est nécessaire.



NG



La carte d'évaluation de l'usure des inserts peut être utilisée pour les inserts suivants : G1, G4, G6, G8, G9, P1/P1D, P10, et P20

Clé de remplacement d'insert avec limiteur de couple

Pour les inserts G1- G68D, P1- P41, E15D, E30RD, E30LD, E31D et E32D.

*Veuillez serrer l'insert jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Clé de remplacement pour l'insert E :

Pour V10 (support d'insert V-tip), ainsi que pour les inserts E4, E4D, E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E9, E9D, E11 et E12.



Vidéos sur les inserts Varios

Veuillez visionner les vidéos sur la gamme d'inserts Varios sur les sites Web ci-dessous. Vous découvrirez pourquoi la précision et la qualité sont des synonymes de NSK.



Détartreur ultrasonique de la série VARIOS



Description de la série [Varios 970]
Entretien



Inserts Varios



Description des inserts